

Ποια είναι η χρήση του Nasaleze Allergy Blocker?

Χρησιμοποιείτε το **Nasaleze Allergy Blocker** προτού εμφανισθούν τα συμπτώματα της αλλεργίας.

Το **Nasaleze Allergy Blocker** αποτελεί ένα φυσικό, ιατροτεχνολογικό προϊόν που συμβάλλει αποτελεσματικά στην προληπτική αντιμετώπιση της αλλεργίας και των συμπτωμάτων που αυτή προκαλεί. Η χρήση του **Nasaleze Allergy Blocker** προστατεύει τη ρινική κοιλότητα από την είσοδο αλλεργιογόνων ουσιών που εισπνέονται από τη μύτη και προκαλούν την αλλεργική αντίδραση. Είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι, το **Nasaleze Allergy Blocker** είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε περιπτώσεις ήπιας και μέτριας αλλεργικής ρινίτιδας.

Σε αντίθεση με τα φάρμακα που βοηθούν αποκλειστικά στην αντιμετώπιση των αλλεργικών συμπτωμάτων, το **Nasaleze Allergy Blocker** λειτουργεί και προληπτικά, καθώς μπορεί να σταματήσει την αλλεργική αντίδραση προτού εκδηλωθούν τα συμπτώματα αυτά.

Στην περίπτωση που η αλλεργική αντίδραση έχει ξεκινήσει πριν τη χρήση του **Nasaleze Allergy Blocker**, περιμένετε έως ότου υποχωρήσουν τα πρώτα, έντονα συμπτώματα (περίπου 30 λεπτά) και κατόπιν, φυσήξτε τη μύτη σας και χρησιμοποιήστε το **Nasaleze Allergy Blocker**.

Σε περίπτωση που φυσήξετε τη μύτη σας ή χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο προϊόν ρινικής χρήσεως, χρησιμοποιήστε το **Nasaleze Allergy Blocker** ξανά, ώστε να διασφαλίσετε ότι το προϊόν παραμένει δραστικό και παρέχει τη μέγιστη δυνατή προστασία.

Το **Nasaleze Allergy Blocker** μπορεί να χορηγηθεί σε συνδυασμό με φαρμακευτικά προϊόντα, στο πλαίσιο μιας πιο ολοκληρωμένης θεραπευτικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της αλλεργικής ρινίτιδας και της αλλεργίας γενικότερα.


Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει το Nasaleze Allergy Blocker?

- Το **Nasaleze Allergy Blocker** μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλη την οικογένεια συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων ατόμων, των εγκύων & θηλαζουσών γυναικών, των αθλητών και των παιδιών ηλικίας 18 μηνών και άνω.
- Το **Nasaleze Allergy Blocker** δεν περιέχει φαρμακευτικές ουσίες.
- Το **Nasaleze Allergy Blocker** είναι ένα φυτικό προϊόν υψηλής καθαρότητας και ασφάλειας.
- Το **Nasaleze Allergy Blocker** δεν προκαλεί καταρροή.

Ποια είναι η δράση του Nasaleze Allergy Blocker?

Το **Nasaleze Allergy Blocker** αποτελεί ένα πρωτοποριακό, ρινικό εκνέφωμα σκόνης φυσικής куτταρίνης. Μόλις εισέρχεται στη μύτη, σχηματίζει ένα διάφανο, προστατευτικό στρώμα (gel) στα τοιχώματα της ρινικής κοιλότητας που εγκλωβίζει τα εισερχόμενα αλλεργιογόνα και αποτρέπει την ανεπιθύμητη δράση τους.

Το **Nasaleze Allergy Blocker** προστατεύει τη βλεννογόνο της ρινικής κοιλότητας από την εισβολή των αλλεργιογόνων που προκαλούν την αλλεργική αντίδραση. Κατ' αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η αποκοκκίωση των μαστοκυττάρων και η επακόλουθη απελευθέρωση της ανοσοσφαιρίνης E (IgE) και της ισταμίνης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το **Nasaleze Allergy Blocker** να αποτρέπει την εμφάνιση των δυσάρεστων συμπτωμάτων της αλλεργικής ρινίτιδας.

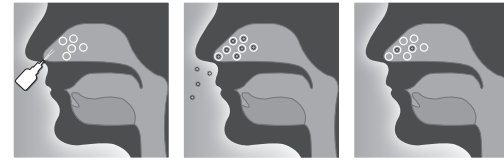

SPRAY → **TRAP & PROTECT** → **HELPS DEFEND AGAINST HAY FEVER & ALLERGIES**

46 κλινικές μελέτες, που πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή χιλιάδων ασθενών και δημοσιεύθηκαν σε κορυφαία διεθνή ιατρικά περιοδικά, τεκμηριώνουν την ασφαλή δράση και αποτελεσματικότητα του **Nasaleze Allergy Blocker**. Το προϊόν έχει κερδίσει βραβεία και συμπεριλαμβάνεται επισήμως στις Εθνικές Οδηγίες για την καταπολέμηση της αλλεργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το συστατικό αλλεργιολόγοι, ωτορινολαρυγγολόγοι και παιδίατροι παγκοσμίως.

Συστατικά

- HPMC 98.5%
- Σκόνη μέντας 1.5%

Κατάλληλο για Vegans

Παράγεται από την: Nasaleze Ltd, Unit 3, Woodside House, Ballafletcher Business Park, Douglas, IM4 4QE, Isle of Man, UK

UK Responsible Person: Atlantic Bridge Ltd, 19 Willowside, Woodley, Berkshire, RG5 4HJ, UK

European Authorised Representative: Acorn Regulatory Consultancy Services Ltd, Knockmorris, Cahir, Co. Tipperary, E21 R766, Ireland

Εισάγεται από την: INPA A.E. 17ης Νοεμβρίου 73-75, 55534 Θεσσαλονίκη, info@inpa-gr.com www.inpa-gr.com

Text revised 11/22 by Nasaleze Group NASA-ALL-GR 09/23

Επεξήγηση συμβόλων		Ιστοσελίδα ενημέρωσης ασθενών
UK CA	Αξιολόγηση συμμόρφωσης Ηνωμένου Βασιλείου	Προσοχή
CE	Σήμανση συμμόρφωσης CE	Ιατροτεχνολογικό προϊόν
LOT	Κωδικός παρτίδας	Διατηρείται σε ξηρό περιβάλλον
1h	Χρήση από ένα μόνο άτομο	Προσοχή
MD	Ημερομηνία λήξης	Προσοχή
EC REP	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ΕΕ	Προσοχή
MD	Κατασκευαστής	Προσοχή
MD	Συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσεως	Προσοχή

Τρόπος χρήσης του Nasaleze Allergy Blocker

Για αποτελεσματική προστασία από τα αλλεργιογόνα, το **Nasaleze Allergy Blocker** πρέπει να χρησιμοποιείται 2 με 3 φορές ημερησίως σε κάθε ρουθόνη. Έχει αποδειχθεί ότι το **Nasaleze Allergy Blocker** παραμένει ενεργό και αποτελεσματικό για έως και 6 ώρες* ανά εφαρμογή. *(Diethart/Emberlin In vitro study)

Η συχνότητα εφαρμογής του **Nasaleze Allergy Blocker** εξαρτάται από την ποσότητα των αλλεργιογόνων και τη σοβαρότητα των αλλεργιών του κάθε ασθενή.

Υπευθύνιση – Χρησιμοποιείτε το Nasaleze Allergy Blocker προτού εμφανισθούν τα συμπτώματα της αλλεργίας.

- 1** Φυσήξτε καλά τη μύτη σας ώστε να καθαρίσει η ρινική κοιλότητα.
- 2** Ανακινείτε καλά το φιαλίδιο πριν από κάθε χρήση.
- 3** Κατά την πρώτη χρήση, απασφαλίστε το πώμα και κρατώντας το φιαλίδιο ορθό με το ακροαίο προς τα επάνω, πιέστε δοκιμαστικά στον αέρα για να ενεργοποιηθεί το δόσομετρο ή και να επτευθεί μια δόση, ιδανικά μία στήλη εκνεφώματος ύψους 10-15 εκάστων. Αν δυσκολευθείτε να πιέσετε το φιαλίδιο με το ένα χέρι, χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια.
- 4** Εισάγετε το ρύγχος του φιαλιδίου στο ένα ρουθόνη.
- 5** Κλείστε το άλλο ρουθόνη και πιέστε μία έως δύο φορές. Περιμένετε 2 δευτερόλεπτα και μετά αναπνεύστε κανονικά. Επαναλάβετε τη χρήση 2 έως 3 φορές την ημέρα. Σε περίπτωση που φυσήξετε τη μύτη σας, χρησιμοποιήστε το **Nasaleze Allergy Blocker** ξανά.

Σαρώστε για να παρακολουθήσετε βίντεο σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Nasaleze

Σε περίπτωση που το Nasaleze Allergy Blocker δεν αντιμετωπίζει τα συμπτώματα επαρκώς ...

- Συμβουλευθείτε τον ιατρό σας αναφορικά με το ποια φαρμακευτική αγωγή μπορείτε να λάβετε συνδυαστικά με το **Nasaleze Allergy Blocker** για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αλλεργικών συμπτωμάτων.
- Σε περίπτωση εμφάνισης έντονων συμπτωμάτων πριν τη χρήση του προϊόντος, περιμένετε έως ότου υποχωρήσουν τα συμπτώματα αυτά (περίπου 30 λεπτά) και κατόπιν χρησιμοποιήστε το **Nasaleze Allergy Blocker**.
- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο και χρησιμοποιήστε το **Nasaleze Allergy Blocker** ακολουθώντας τα 5 παραπάνω βήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.nasaleze.gr



Τρόπος Φύλαξης του Nasaleze Allergy Blocker

- Να φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά.
- Αποφύγετε την εισχώρηση υγρασίας.
- Μην ρίχνετε νερό ή άλλα υγρά στο μπουκάλι.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν η ταϊνία ασφαλείας έχει αφαιρεθεί.
- Ασφαλίζετε το πώμα πάντα μετά τη χρήση.
- Φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος, μεταξύ 5°C και 30°C.
- Μετά την πρώτη χρήση το προϊόν διατηρείται για 6 μήνες.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν στο ψυγείο.



Προειδοποιήσεις

- Να μην χρησιμοποιείται σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 18 μηνών.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν παρουσιάζετε ευαισθησία στην κυτταρίνη ή/και τη μέντα.
- Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.
- Αποφύγετε την επαφή με ανοιχτές πληγές.
- Εάν η σκόνη έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
- Για την αποφυγή μόλυνσης, να μην χρησιμοποιείται από περισσότερα του ενός άτομου.
- Κατά την πρώτη χρήση, ενδέχεται να σας παρουσιασθούν συμπτώματα όπως μούδιασμα, ελαφρύ αίσθημα καύσου ή/και ήπιο φτέρνισμα. Τα συμπτώματα αυτά είναι προσωρινά και συνήθως υποχωρούν με τη σταδιακή εξοικείωση του οργανισμού στη χρήση του **Nasaleze Allergy Blocker**.
- Ενδέχεται επίσης να αισθανθείτε προσωρινά κάποια μορφή ερεθισμού, ιδίως εάν προϋπάρχει φλεγμονή στη ρινική κοιλότητα.
- Σε κάποια άτομα έχει καταγραφεί η αίσθηση ήπιας ρινικής απόφραξης, αυτό είναι φυσιολογικό και αποτέλεσμα της προστατευτικής δράσης του **Nasaleze Allergy Blocker**. Σε περίπτωση που αισθανθείτε έντονη ρινική απόφραξη, μειώστε τη συχνότητα χρήσης του προϊόντος και βεβαιωθείτε ότι το χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως.
- Εάν αισθανθείτε έντονη δυσφορία αμέσως μετά την εφαρμογή του **Nasaleze Allergy Blocker**, συμβουλευθείτε τον ιατρό σας.
- Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο προϊόν ρινικής χρήσεως, χρησιμοποιήστε το **Nasaleze Allergy Blocker** ξανά, ώστε να διασφαλίσετε ότι το προϊόν παραμένει δραστικό και παρέχει τη μέγιστη δυνατή προστασία.
- Ελάχιστες περιπτώσεις ήπιων αλλεργικών αντιδράσεων όπως ρινική απόφραξη, καταρροή, φτέρνισμα ή πονόλαιμος έχουν αναφερθεί. Σε περίπτωση που εκδηλωθούν σοβαρότερα συμπτώματα ή αισθανθείτε έντονη δυσφορία, διακόψτε άμεσα τη χρήση του προϊόντος και συμβουλευθείτε τον ιατρό σας.
- Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει ήπια ρινόρραγια.
- Να μην χρησιμοποιείται συνεχόμενα για περισσότερες από 30 ημέρες.