

**Ποια είναι η χρήση του Nasaleze Cold & Flu Blocker?**

Χρησιμοποιήστε το **Nasaleze Cold & Flu Blocker** προτού εμφανιστούν τα συμπτώματα της γρίπης ή του κρυολογήματος.

Το **Nasaleze Cold & Flu Blocker** αποτελεί ένα φυσικό, ιατροτεχνολογικό προϊόν που συμβάλλει αποτελεσματικά στην προληπτική αντιμετώπιση της γρίπης και του κρυολογήματος.

Από κλινικές μελέτες διαπιστώθηκε ότι το **Nasaleze Cold & Flu Blocker** συμβάλλει στην αποτροπή εκδήλωσης συμπτωμάτων γρίπης ή κρυολογήματος ή ότι συντομεύει την διάρκειά τους. Σε περίπτωση που τα συμπτώματα του κρυολογήματος ή της γρίπης έχουν ήδη ξεκινήσει, το **Nasaleze Cold & Flu Blocker**, μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε την ένταση και τη διάρκειά τους.

Είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι το **Nasaleze Cold & Flu Blocker** είναι αποτελεσματικό σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας άνω των 3 ετών.

Σε περίπτωση που φυσήξετε τη μύτη σας ή χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο προϊόν ρινικής χρήσεως, εφαρμόστε το **Nasaleze Cold & Flu Blocker** ξανά, ώστε να διασφαλιστεί ότι το προϊόν παραμένει δραστικό και παρέχει τη μέγιστη δυνατή προστασία.

Το **Nasaleze Cold & Flu Blocker** μπορεί να χορηγηθεί σε συνδυασμό με φαρμακευτικά προϊόντα, στο πλαίσιο μιας πιο ολοκληρωμένης θεραπευτικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της γρίπης και του κρυολογήματος.

**Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει το Nasaleze Cold & Flu Blocker?**

• Το **Nasaleze Cold & Flu Blocker** μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλη την οικογένεια συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων ατόμων, των εγκύων & θηλαζουσών γυναικών, των αθλητών και των παιδιών ηλικίας 3 ετών και άνω.

• Το **Nasaleze Cold & Flu Blocker** δεν περιέχει φαρμακευτικές ουσίες.

• Το **Nasaleze Cold & Flu Blocker** είναι ένα φυτικό προϊόν υψηλής καθαρότητας και ασφάλειας.

• Το **Nasaleze Cold & Flu Blocker** δεν προκαλεί καταρροή.

**Ποια είναι η δράση του Nasaleze Cold & Flu Blocker?**


Το κρυολόγημα και η γρίπη μεταδίδονται πολύ εύκολα μέσω της αναπνευστικής οδού και κατά κύριο λόγο μέσω της μύτης όπου τα σωματίδια εισέρχονται σε αυτή και προσκολλώνται στη ρινική κοιλότητα, πολλαπλασιάζονται και εξαπλώνονται. Το αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση δυσάρεστων συμπτωμάτων όπως ρινική συμφόρηση ή καταρροή, πονόλαιμος, πονοκέφαλος και βήχας. Στα αρχικά στάδια μπορεί να είναι δύσκολο να γίνει διάκριση μεταξύ του κοινού κρυολογήματος και της γρίπης. Η γρίπη είναι μια δυναμικά σοβαρή νόσος και η οριστική διάγνωση απαιτεί λεπτομερή εξέταση από ειδικό γιατρό.

Το **Nasaleze Cold & Flu Blocker** αποτελεί ένα πρωτοποριακό, ρινικό εκνέφωμα σκόνης φυσικής куτταρίνης. Μόλις εισέρχεται στη μύτη, σχηματίζει ένα διάφανο, προστατευτικό στρώμα (gel) στα τοιχώματα της ρινικής κοιλότητας που εγκλωβίζει και εξουδετερώνει τα αερομεταφερόμενα μικρόβια, αποτρέποντας την ανεπιθύμητη δράση τους.

Το **Nasaleze Cold & Flu Blocker** μπορεί να μειώσει τη διάρκεια και την ένταση των συμπτωμάτων του κρυολογήματος και της γρίπης.

Το **Nasaleze Cold & Flu Blocker** συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου επανεμφάνισης των συμπτωμάτων του κρυολογήματος και της γρίπης.

Η ασφαλής δράση και αποτελεσματικότητα του **Nasaleze Cold & Flu Blocker** έχει αποδειχθεί σε 9 κλινικές μελέτες.

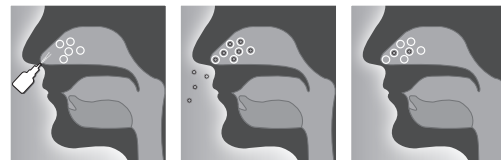

**SPRAY** → **TRAP & DEACTIVATE** → **HELPS DEFEND AGAINST COLD & FLU**

**Συστατικά**

- ΗPMC 93%
- Σκόνη μέντας 2%
- Σκόνη Ευρωπαϊκού Άγριου Σκόρδου 5%

Κατάλληλο για Vegans

Παράγεται από την: Nasaleze Ltd, Unit 3, Woodside House, Ballafletcher Business Park, Douglas, IM4 4QE, Isle of Man, UK

UK Responsible Person: Atlantic Bridge Ltd, 19 Willowside, Woodley, Berkshire, RG5 4HJ, UK

European Authorised Representative: Acorn Regulatory Consultancy Services Ltd, Knockmorris, Cahir, Co. Tipperary, E21 R766, Ireland

Εισάγεται από την: INPA A.E. 17ης Νοεμβρίου 73-75, 55534 Θεσσαλονίκη, info@inpa-gr.com www.inpa-gr.com

Text revised 11/22 by Nasaleze Group NASA-COLD-GR 09/23

Επεξήγηση συμβόλων			Ιστοσελίδα ενημέρωσης ασθενών
UK CA	Αιολόγηση συμμόρφωσης Ηνωμένου Βασιλείου	Χρήση από ένα μόνο άτομο	Προσοχή
CE	Σήμανση συμμόρφωσης CE	Ημερομηνία λήξης	Κατασκευαστής
LOT	Κωδικός παρτίδας	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ΕΕ	Ιατροτεχνολογικό προϊόν
		Συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσεως	Διατηρείται σε ξηρό περιβάλλον

**Τρόπος χρήσης του Nasaleze Cold & Flu Blocker**


Για αποτελεσματική προστασία από τη γρίπη και το κρυολόγημα, το **Nasaleze Cold & Flu Blocker** πρέπει να χρησιμοποιείται 2 με 3 φορές ημερησίως σε κάθε ρουθόνη. Σε περίπτωση που τα συμπτώματα έχουν ήδη ξεκινήσει, χρησιμοποιήστε το **Nasaleze Cold & Flu Blocker** 3 φορές ημερησίως και μέχρι να υποχωρήσουν πλήρως.



1 Φυσήξτε καλά τη μύτη σας ώστε να καθαρίσει η ρινική κοιλότητα.



2 Ανακινείτε καλά το φιαλίδιο πριν από κάθε χρήση.

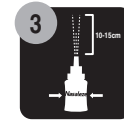

3 Κατά την πρώτη χρήση, ασφαλίστε το πώμα και κρατώντας το φιαλίδιο ορθό με το ακροφύσιο προς τα επάνω, πιέστε δοκιμαστικά στον αέρα για να ενεργοποιήσετε το δοσομετρητή και να επιτευχθεί μία δόση, ιδανικά μία στήλη εκνεφώματος ύψους 10-15 εκατοστών. Αν δυσκολευθείτε να πιέσετε το φιαλίδιο με το ένα χέρι, χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια.



4 Εισάγετε το ρύγχος του φιαλιδίου στο ένα ρουθόνη.



5 Κλείστε το άλλο ρουθόνη και πιέστε μία έως δύο φορές. Περιμένετε 2 δευτερόλεπτα και μετά αναπνεύστε κανονικά. Επαναλάβετε τη χρήση 2 έως 3 φορές την ημέρα. Σε περίπτωση που φυσήξετε τη μύτη σας, χρησιμοποιήστε το **Nasaleze Cold & Flu Blocker** ξανά.



Σαρώστε για να παρακολουθήσετε βίντεο σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Nasaleze

**Σε περίπτωση που το Nasaleze Cold & Flu Blocker δεν αντιμετωπίζει τα συμπτώματα επαρκώς ...**

• Συμβουλευθείτε τον ιατρό σας αναφορικά με το ποια φαρμακευτική αγωγή μπορείτε να λάβετε συνδυαστικά με το **Nasaleze Cold & Flu Blocker** για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του κρυολογήματος και της γρίπης.

• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο και χρησιμοποιήστε το **Nasaleze Cold & Flu Blocker** ακολουθώντας τα 5 παραπάνω βήματα.



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: [www.nasaleze.gr](http://www.nasaleze.gr)



**Τρόπος Φύλαξης του Nasaleze Cold & Flu Blocker**

- Να φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά.
- Αποφύγετε την εισχώρηση υγρασίας.
- Μην ρίχνετε νερό ή άλλα υγρά στο μπουκάλι.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν η ταινία ασφάλειας έχει αφαιρεθεί.
- Ασφαλίστε το πώμα πάντα μετά τη χρήση.
- Φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος, μεταξύ 5°C και 30°C.
- Μετά την πρώτη χρήση το προϊόν διατηρείται για 6 μήνες.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν στο ψυγείο.



**Προειδοποιήσεις**

- Να μην χρησιμοποιείται σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν παρουσιάζετε ευαισθησία στην куτταρίνη, τη μέντα ή το σκόρδο.
- Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.
- Αποφύγετε την επαφή με ανοιχτές πληγές.
- Εάν η σκόνη έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
- Για την αποφυγή μόλυνσης, να μην χρησιμοποιείται από περισσότερα από ενός άτομου.
- Κατά την πρώτη χρήση, ενδέχεται να σας παρουσιασθούν συμπτώματα όπως μούδιασμα, ελαφρύ αίσθημα καύσου ή/και ήπιο φτέρνισμα. Τα συμπτώματα αυτά είναι προσωρινά και συνήθως υποχωρούν με τη σταδιακή εξοικείωση του οργανισμού στη χρήση του **Nasaleze Cold & Flu Blocker**.
- Ενδέχεται επίσης να αισθανθείτε προσωρινά κάποια μορφή ερεθισμού, ιδίως εάν προϋπάρχει φλεγμονή στη ρινική κοιλότητα.
- Σε κάποια άτομα έχει καταγραφεί η αίσθηση ήπιας ρινικής απόφραξης, αυτό είναι φυσιολογικό και αποτέλεσμα της προστατευτικής δράσης του **Nasaleze Cold & Flu Blocker**. Σε περίπτωση που αισθανθείτε έντονη ρινική απόφραξη, μειώστε τη συχνότητα χρήσης του προϊόντος και βεβαιωθείτε ότι το χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως.
- Εάν αισθανθείτε έντονη δυσφορία αμέσως μετά την εφαρμογή του **Nasaleze Cold & Flu Blocker**, συμβουλευθείτε τον ιατρό σας.
- Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο προϊόν ρινικής χρήσεως, χρησιμοποιήστε το **Nasaleze Cold & Flu Blocker** ξανά, ώστε να διασφαλιστεί ότι το προϊόν παραμένει δραστικό και παρέχει τη μέγιστη δυνατή προστασία.
- Ελάχιστες περιπτώσεις ήπιων αλλεργικών αντιδράσεων όπως ρινική απόφραξη, καταρροή, φτέρνισμα ή πονόλαιμος έχουν αναφερθεί. Σε περίπτωση που εκδηλωθούν σοβαρότερα συμπτώματα ή αισθανθείτε έντονη δυσφορία, διακόψτε άμεσα τη χρήση του προϊόντος και συμβουλευθείτε τον ιατρό σας.
- Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει ήπια ρινορραγία.
- Να μην χρησιμοποιείται συνεχόμενα για περισσότερες από 30 ημέρες.